


在麻醉机背面找一个合适位置的现成螺丝，把U形安装槽装上去，仅装一颗螺丝即可，上下任选其一.....



把AGSS挂在U形槽上，手拧两颗螺丝使其接触麻醉机背板受力形成三点定位，把负压管的快插接头插上.....

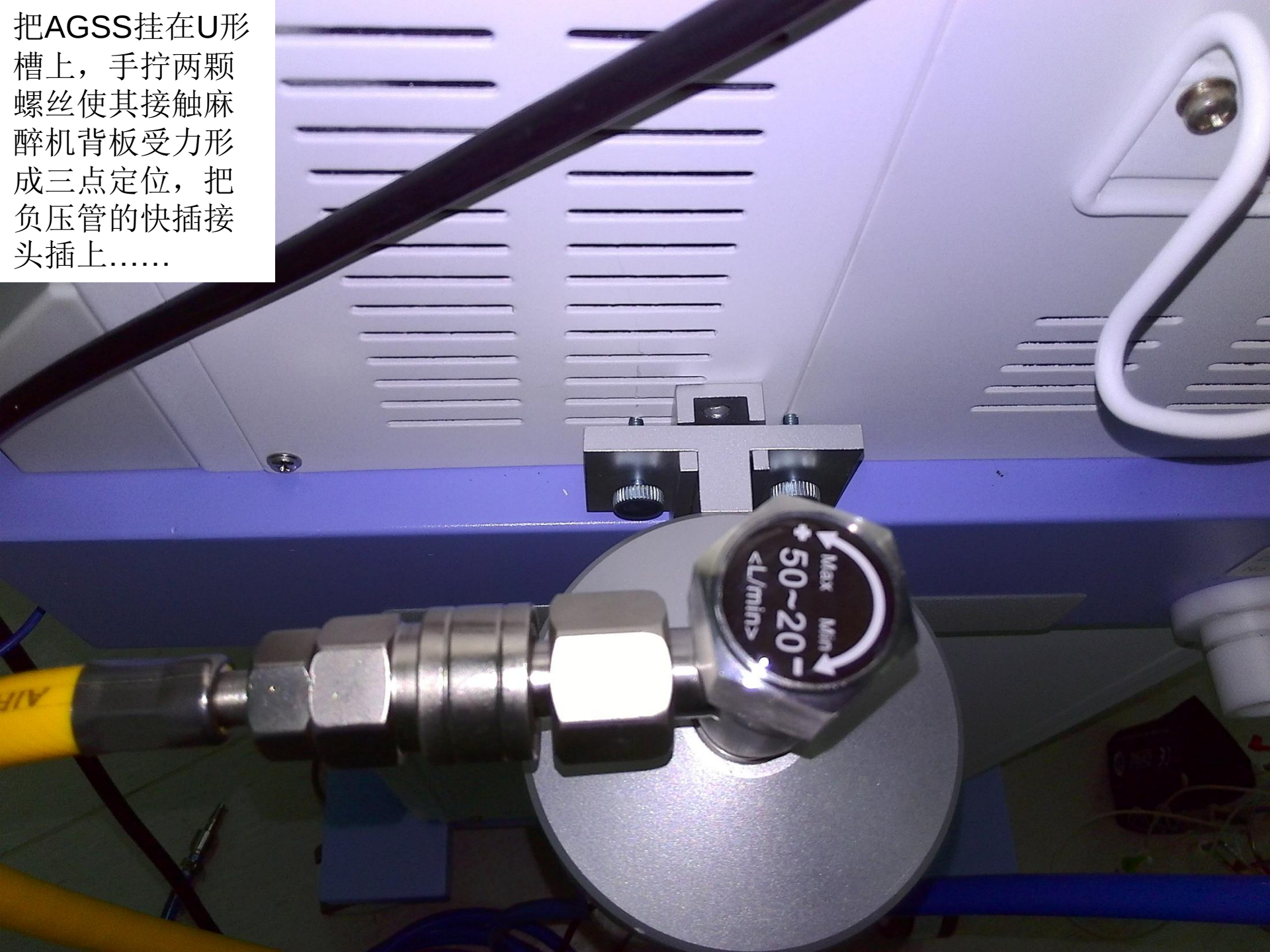

把负压管的另一端与吊塔负压接口连接.....



把灰色废气管一端插在AGSS底部，一端插在麻醉机的废气出口，然后用手拧的卡箍固定紧，如果遇到德尔格的机型，接头较小无法紧固时，可利用附带的生胶带对废气出口进行加粗后再插入废气管

.....
...

安装完成！



安装在迈瑞
EX55麻醉机



安装在迈瑞
EX55麻醉机



安装在〉 谊安
7500A麻醉机



安装在〉 谊安
7500A麻醉机
.....此款麻醉机
废气出口尺寸不
标准，需要提前
准备接头转换材
料.....




安装在〉 谊安
7500A麻醉机
.....此款麻醉机
废气出口尺寸不
标准，需要提前
准备接头转换材
料.....



安装在〉德尔格
Fabius Tiro麻醉机



安装在〉德尔格
Fabius Tiro麻醉
机.....可直接挂
在机器侧面导轨
上, 不需安装U形
固定槽

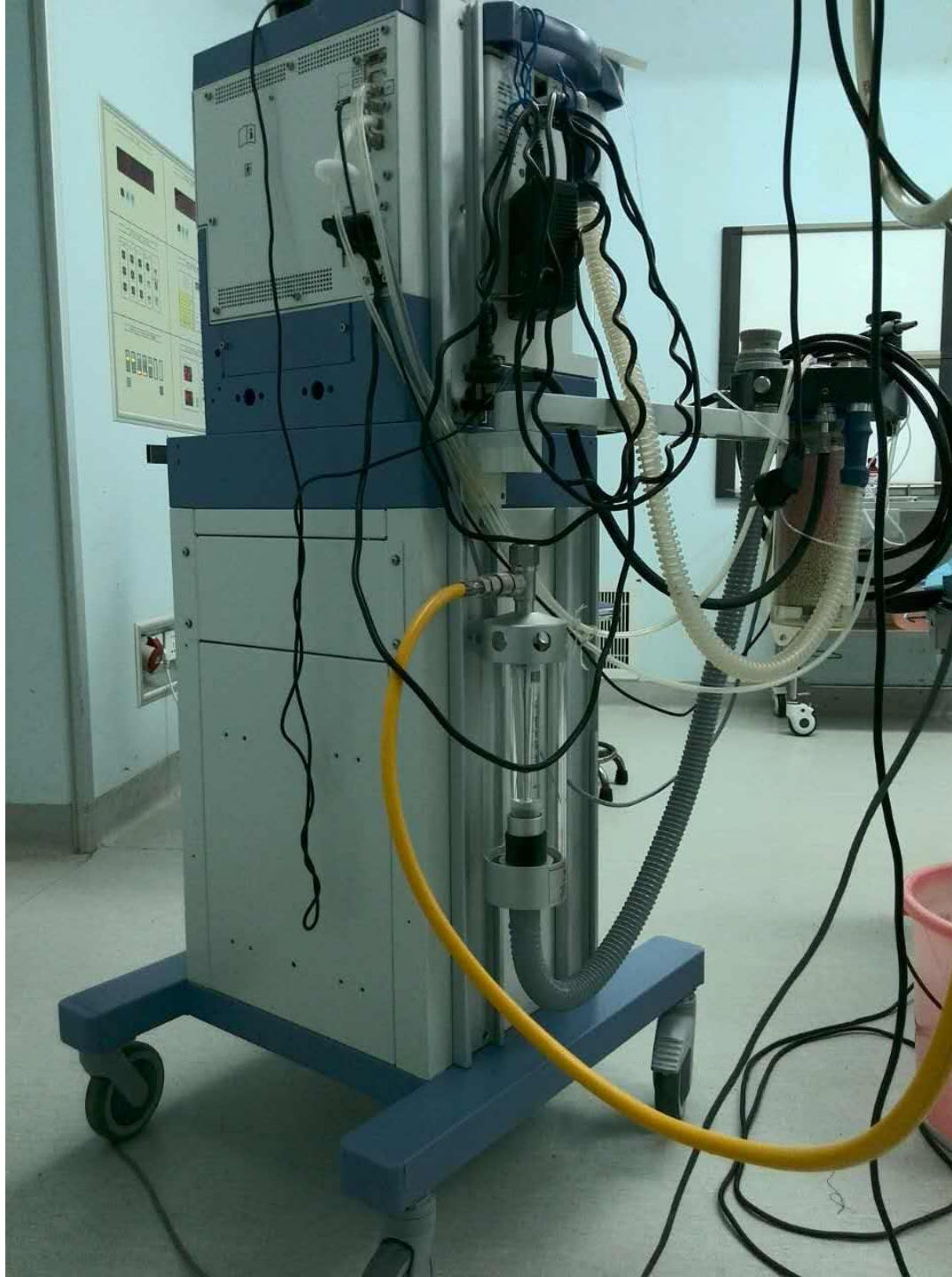

安装在〉 谊安
Aeon8600A麻醉机



安装在〉 谊安
Aeon8600A麻醉
机.....可直接挂
在侧面的导轨上
，不需安装U形槽



安装在迈瑞
EX65麻醉机



安装在迈瑞
EX65麻醉机.....
可直接挂在侧面
导轨上，不需安
装U形槽



安装在> 欧美达
Aespire麻醉机



安装在欧美达
Aespire麻醉机



安装在普博
Boaray700D麻醉机



安装在普博
Boaray700D麻醉机



Thank you!
the end !